



# PeriData Merkblatt

für die Praxis / Klinik

ergänzt und geprüft am

von

<p>Wie starte ich PeriData aus der Praxis-Software ?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Patienten-Akte in der Praxis-Software öffnen</li></ul> <p><i>fülle die Schritte ein, die in deiner Praxis-Software nötig sind:</i></p> <div data-bbox="563 539 1457 808" style="border: 1px dashed gray; height: 120px;"></div> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ das PeriData-Fenster zeigt die bisher gespeicherten Untersuchungen</li></ul>
<p>Wie sende ich die aktuelle Untersuchung vom Gerät zu PeriData?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ PeriData aus der Akte starten &gt;&gt; wartet auf Daten</li><li>▶ beim Speichern am Ende der Untersuchung werden die Daten automatisch gesendet</li></ul> <p><i>?? streiche das durch, wenn es nicht automatisch ist und fülle die Schritte ein, die in deinem Perimeter notwendig sind:</i></p> <div data-bbox="563 1216 1457 1346" style="border: 1px dashed gray; height: 58px;"></div>
<p>Wie sende ich gespeicherte Untersuchungen vom Gerät zu PeriData ?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ klicke auf den roten Perimeter-Button &gt;&gt; ein Fenster öffnet sich</li></ul> <div data-bbox="1246 1379 1457 1476" style="border: 1px solid gray;"></div> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ klicke auf den Button <b>? HILFE</b> &gt;&gt; eine genaue Beschreibung für dein Gerät wird gezeigt</li></ul>
<p>Wie schließe ich das PeriData-Fenster ?</p>	<p><i>wenn die Daten angekommen und geprüft sind, kann PeriData geschlossen werden</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ klicke auf das rote Kreuz in der Buttonleiste &gt;&gt; das Fenster schließt sich</li></ul> <div data-bbox="1374 1783 1449 1856" style="border: 1px solid gray;"></div>
<p>Wo rufe ich bei Problemen an ?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ +49 22 info 044 264 770</li><li>▶ Deutschland 022 044 264 770</li><li>▶ email: @peridata.com</li></ul>